



PAINEL GENÔMICO

Código: GENOM

Material: Saliva

Sinônimo: Pathway Fit, Dieta, Nutrição e Exercícios

Volume: 2,0 mL

Método: Genotipagem em grande escala utilizando sondas moleculares múltiplas

Volume Lab.: 2,0 mL

Rotina:

Temperatura: Ambiente

Coleta: Antes do agendamento da coleta deve ser solicitado o kit especial e instruções de envio.

O LAUDO NÃO SERÁ DISPONIBILIZADO NA INTERNET.

O paciente não deve se alimentar, beber, fumar, mastigar, escovar os dentes ou bochechar nos 60 minutos que antecedem o exame.

Solicitar a leitura, preenchimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Paciente para Teste Genético.

No folheto SOLICITAÇÃO DO MÉDICO/FORMÚLARIO DE PEDIDO, deverá ser preenchido o campo INFORMAÇÕES DO PACIENTE, colocando no lugar do nome a O.S. do paciente, data de nascimento, idade, sexo, peso, altura e data de coleta da amostra. Não preencher com o nome, endereço, telefone, e-mail, cidade, estado, CEP e país.

Assinalar a etnia e o(s) teste(s) a ser(em) realizado(s).

O campo INFORMAÇÕES DO MÉDICO SOLICITANTE e CONSENTIMENTO ESCLARECIDO não deverá ser preenchido.

Orientar o cliente a soltar (cuspir) a saliva sem espuma (necessário 2 mL de saliva demarcado no tubo de coleta);

Rosquear o frasco com cuidado até que o lacre interno da rosca se rompa, e certificar-se que o lacre foi totalmente rompido;

Homogeneizar por inversão, delicadamente, o recipiente por 4 vezes;

Após o fechamento o frasco não deverá ser aberto.

Anotar a OS do paciente no frasco com a amostra.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Paciente para Teste Genético e a SOLITAÇÃO DO MÉDICO/FORMÚLARIO DE PEDIDO devem ser acondicionados na parte inferior da caixa, e o frasco na parte superior.

Não acondicionar no saco canguru e não lacrá-lo.

Realizar o fechamento da caixa e identificar (pelo lado de fora) com a etiqueta de código de barras, A CAIXA DO KIT NÃO DEVE SER LACRADA.

Destinar a caixa ao setor de Externos.